

**DK Katapultsæde . . . . . 3**

Gør det nemmere at rejse sig op fra alle gængse sidemøbler

**S Uppresningshjälp . . . . . 5**

Hjælper dig att resa dig från alla vanliga sittmöbler





Kære kunde!

Vi glæder os over, at du har købt dette katapultsæde, og håber, at du vil have meget glæde af det. Dette katapultsæde vil gøre det nemmere for dig at rejse dig op fra alle gængse sidde møbler.

### ⚠ Sikkerhedsanvisninger

- Pas på, at fingrene ikke kommer i klemme mellem sideflade og understel.
- Brug katapultsædet kun på fast stående sidde møbler (ikke på kontorstole mv.).
- Sidde møblerne må ikke være for bløde, idet katapultsædets funktion ellers vil være indskrænket.
- Tag altid plads lodret og midt på katapultsædet.

### Tekniske data

Bredde: . . . . . 47 cm

Dybde: . . . . . 42 cm

Højde: . . . . . 9 - 25 cm

Vægt: . . . . . 3,7 kg

### Vedligeholdelse

Kontrollér katapultsædets tilstand med jævne mellemrum. Vær herved specielt opmærksom på deformationer og revner. Hvis skader af denne slags opdages, må katapultsædet ikke mere anvendes.

### Rengøring og pleje

#### Sædebetræk:

- Håndvask ved temperaturer under 30° C.
- Lad betrækket tørre ved rumtemperatur.
- Undgå varmekilder.



#### Siddeflade og understel af plast:

- Tilsmudsninger fjernes med en blød klud og eventuelt et almindeligt neutralt rengøringsmiddel. Tør herefter omhyggeligt af.
- Sædet må ikke rengøres med stærke rengøringsmidler, syre eller lud.

### Henvisning vedr. bortskaffelse

Katapultsædet skal bortskaffes miljørigtigt via et godkendt affaldsselskab eller en kommunal genbrugsplads. Følg de aktuelt gældende forskrifter.

### Funktion af katapultsædet

Dette katapultsæde gør det nemmere for dig at rejse dig op fra alle gængse sidde møbler. Når du sætter dig ned, vil katapultsædet affjedre dette på behagelig vis, og når du rejser dig op, vil det understøtte dig med op til 80 % ved hjælp af opdriften.

#### Sådan tager man plads



Tag plads i midten af katapultsædets siddeplade. Ved korrekt justering sænkes siddefladen nedad, indtil den har nået sin endelige position og hviler fuldstændigt på understellet.


#### Rejser man sig op



Vip overkroppen let fremover og løft hele kroppen som sædvanligt, når du rejser dig op fra en siddeplads. Katapultsædets opdrift understøtter herved kroppens bevægelse opad med op til 80 %.

### Justering af katapultsædet

Katapultsædet kan tilpasses brugerens kropsvægt (45 - 120 kg) i seks trin. For at tilpasse katapultsædet til din kropsvægt sæt løftestangen i den tilsvarende kærve på justeringsskinnen, som befinder sig på undersiden af siddefladen. Ved en lav kropsvægt skal du vælge en lav justeringsposition; med højere kropsvægt vælges en tilsvarende højere justeringsposition og dermed en større opdrift af katapultsædet. Indstillingen, som passer optimalt til dig, kan du bedst finde frem til ved at prøve dig frem.

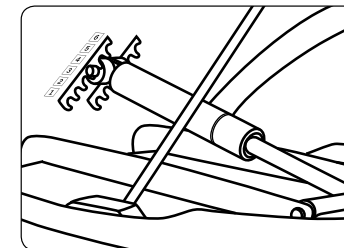



Kära kund,

Tack för att du bestämt dig för vår nya uppresningshjälp. Den hjälper dig att resa dig från alla vanliga sittmöbler.

### **⚠ Säkerhetsanvisningar**

- Se till att inte klämma fingrarna mellan sittytan och underredet.
- Använd uppresningshjälp på sittmöbler utan hjul (dvs. inte kontorsstolar osv.)
- Sittmöbeln får inte vara för mjuk, då uppresningshjälpens funktion i detta fall blir nedsatt.
- Placera dig alltid rakt och i mitten av uppresningshjälp.

### **Mått**

Bredd: . . . . . 47 cm

Djup: . . . . . 42 cm

Höjd: . . . . . 9 - 25 cm

Vikt: . . . . . 3,7 kg

### **Underhåll**

Kontrollera uppresningshjälpens skick med jämna mellanrum. Se särskilt till att inga revor eller deformationer har uppstått. I annat fall bör uppresningshjälp inte användas.

### **Rengöring och vård**

#### **Sitsöverdrag:**

- Handtvätt under 30°
- Låt torka i rumstemperatur
- Undvik värmekällor



#### **Sitsyta och plastunderrede:**

- Avlägsna smuts med en fuktig trasa och, vid behov, vanligt hushållsrengöringsmedel. Torka torrt.
- Använd inga starka rengöringsmedel, syror eller lut.

### **Anvisningar om återvinning**

Lämna in din uppresningshjälp till din kommunala miljöstation för återvinning. Beakta gällande föreskrifter.



### **Så fungerar uppresningshjälp**

Uppresningshjälp hjälper dig att resa dig från alla vanliga sittmöbler. Fjädringen ger dig stöd när du sätter dig och du får upp till 80 % stöd då du reser dig.

#### **När du sätter dig**



Placera dig på mitten av sittytan. Om den är rätt inställd sänker sig sittytan till ändpositionen har nåtts och ligger helt mot underredet.


#### **När du reser dig**



Böj överkroppen lätt framåt och förflytta kroppsvikten som när du normalt reser dig. Uppresningshjälp stöder kroppens uppåtrörelse med upp till 80 %.

### **Inställning av uppresningshjälp**

Uppresningshjälp kan ställas in i sex steg efter kroppsvikt (45-120 kg). För att anpassa uppresningshjälp till din kroppsvikt, placera hävstången i rätt hack i skenan under sittytan.

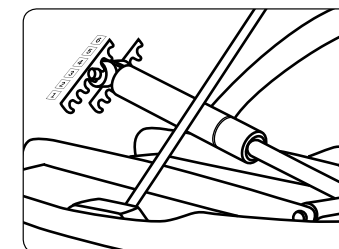

Vid ringa kroppsvikt välj en lägre position; ju högre kroppsvikt, desto högre position och därmed större kraft i rörelsen. Den optimala inställningen för dig hittar du genom att pröva dig fram.

