

Gangstativ

Brugervejledning





Hermed lykønsker vi med erhvervelsen af denne artikel. Dette produkt er blevet udviklet til privat brug. Det er konformt med direktiv 93/42/EØF om medicinske produkter. Gennemlæs venligst den medfølgende brugsvejledning om anvendelsen omhyggeligt forud for brugen. Vær venligst opmærksom på de beskrevne sikkerhedshenvisninger og sørg for, at kun personer med kendskab til disse henvisninger benytter artiklen. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted og giv den ubetinget med, hvis artiklen gives videre.

Formålsbestemt anvendelse:

Dette sammenklappelige gangstativ er et medicinsk produkt, der kun er udviklet til privat brug. Gangstativet er et ganghjælpemiddel og tjener som støtte og sikkerhed for gangbesværede personer.

Anvendelsesområder:

- Ved sygdomstilstande eller ved følgeskader med skavanker i bevægeapparatet og samtidigt skavanker med koordinering/ligevægt
- Til sikring af en resterende gangfunktion
- Til gennemførelse af gangtræning

Det sammenklappelige gangstativ er ikke stift, men besidder en vis bevægelighed, der fremmer bevægelse. Hertil forbliver standfodderne på den ene side på jorden, mens begge standfodder på den modsatte side sættes fremad.

For yderligere spørgsmål om en korrekt anvendelse og/eller højdeindstillingen bør man kontakte en specialist i ganghjælpemidler, egen læge eller terapeut.

Sikkerhedshenvisninger:

- Gangstativet bør udelukkende anvendes indendørs.
- Ved anvendelse af gangstativet skal der altid bæres stabilt og sikkert fodtøj.
- Den maksimale brugervægt på 100 kg må ikke overskrides.
- Gangstativet må kun anvendes til dets formål og kun på plan og fast undergrund.
- For ens egen sikkerhed anvendes dette ganghjælpemiddel kun til gang fremad.
- Forud for anvendelse skal der sørges for en ensartet benlængde og fastlåst arretering.
- Gangstativet skal ikke anvendes som siddemulighed.
- Håndgrebene skal belastes ensartet på begge sider med kropsvægten.
- Gangstativet må kun anvendes i en fejlfri, ubeskadiget tilstand.
- Skruer og forbindelsesdele skal regelmæssigt kontrolleres for deres stabilitet. Henvendelse kan eventuelt ske til en specialforretning.
- Defekte dele skal altid erstattes med originaldele.

Tekniske data:

Mål: ca. 45 x 50 x 76,5 - 94 cm

Højdeindstilling: ca. 76,5 - 94 cm

Maksimal brugervægt: 100 kg

Vægt: ca. 2,9 kg

Leveringsomfang:



1 x gangstativ

1 x brugervejledning

Montering:

Sæt gangstativet sammen som følger:
Tag det sammenklappede gangstativ ud af emballagen og fjern alle plastikposer. Placer gangstativet med dets ben på jorden. Klap så de to sidedele udad, indtil arreteringen (afb. 1, pil) klikker hørbart på plads. Gangstativet er nu klar til brug.

OBS! Anvend kun gangstativet i udklappet tilstand og udelukkende indendørs.

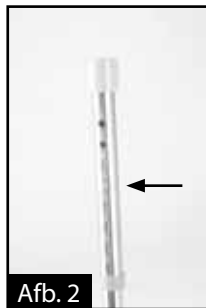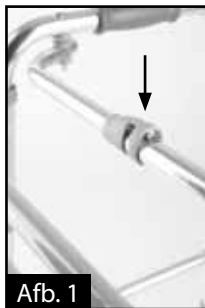

Højdejustering:

Gangstativet skal forud for anvendelsen indstilles til den korrekte højde for brugeren. Hertil skal trykknappen (afb. 2, pil) på gangstativets ben trykkes ind, benet justeres i højden og trykknappen skal igen komme i indgreb i den ønskede højde. For at tilsi- kure, at alle fire ben er justeret til samme højde, er låseåbningerne for en bedre orientering nummereret fra 1 til 8.

Sammenklapning:

Tryk arreteringen ind ovenfra (afb. 1, pil) og fold de to sidedele indad efter hinanden.

Rengøring og opbevaring:

Ved behov kan rammen på gangstativet rengøres med hånden med en mild sæbeopløsning såvel som handels-gængse, milde vaskemidler. Efterfølgende kan gangstativet skylles af med rent vand og tørres med en blød klud. Undgå aggressive, kemiske midler (f.eks. opløsningsmidler)!

Opbevar gangstativet beskyttet mod direkte sollys, tørt og ved stuetemperatur inde i huset ved længere tids manglende brug.

Henvisninger til bortskaffelse:

Bortskaf denne artikel i henhold til aktuelt gældende forskrifter. I tvivlstilfælde kan der indhentes oplysninger hos den lokale genbrugsplads om en miljømæssigt forsvarlig bortskaffelse.

Fremstillet for:
Aspiria nonfood GmbH
Harksheider Straße 3
D-22399 Hamburg

Telefon: +49 40 88 94 16-0
E-mail: info@aspiria-nonfood.de

Stand: 04/2011