

Inställning av sitshöjden

VARNING

- Använd inte produkten om, den har synliga skador !
- Se upp för klämskador vid hålen.
- Använd aldrig duschstolen om justeringsknapparna inte riktigt hakat i hålen.
- Ställ in alla stolsbenen i samma höjd för att undvika att stolen välter.

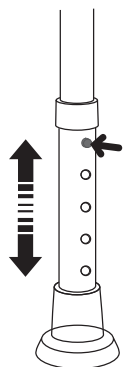


Fig. 4

Tryck in justeringsknapparna på benen ut till önskad höjd.

Det ska synas att det hakar i hålen, se fig. 4. Ställ in benen på samma höjd.

Vrid gummipropparna på så sätt, att de sluter tätt till golvet och att stolen står stadigt.

Användning

Gå in i duschen och placera den som ska duscha på stolen.

Sedan kan man duscha som man brukar.

Rengöring och hantering

⚠ OBS !

Använd aldrig frätande eller skarpa rengöringsmedel eller svampar.

De kan skada ytan.

1. Torka av duschstolen vid behov med en våt trasa och möjligtvis med ett mildt rengöringsmedel.
2. Torka grundligt av duschstolen efteråt, innan den används igen.

Avfallshantering

Produkten och förpackningen lämnas till auktoriserad avfallsåtervinning eller till den kommunala avfallshanteringen. Respektera gällande regler.

Informera er om respektive kommuns miljöregler för avfallshantering.

Denna produkt är i enlighet med EU-direktivet 93/42/EÖFF för medicinska produkter.

Vare nummer / Art nr: 1113
Fremstillet for/ Tillverkad för:
Aspiria nonfood GmbH
Harksheider Straße 3
D-22399 Hamburg

Kilberry®

DK Brusetaburet DH-458

Brugsanvisning

Bemærk! Opbevares for senere opslag!

SE Duschstol DH-458

BRUKSANVISNING

OBS ! Bevaras för återanvändning



BRUSETABURET

Type nr. DH-458

Tekniske data

Max. belastning:.....	100 kg
Størrelse (LxBxH).....	510 x 435 x 400 - 570 mm
Siddefladebredde:.....	370 mm
Reel sidebredde:.....	510 mm
Siddehøjde:.....	340 - 510 mm
Vægt:.....	1,9 kg











DUSCHSTOL

Typ nr. DH-458

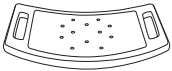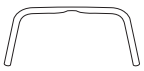
Tekniske data

Max. belastning:.....	100 kg
Størrelse (l x b x h).....	510 x 435 x 400 - 570 mm
Sitsbredd:.....	370 mm
Verklig bredd på sidan.....	510 mm
Sidohöjd:.....	340-510 mm
Vikt:.....	1,9 kg

Tillbehörslista och leverans


1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Sittplatta	Rör	Rör	Ben
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
Gummipropp	Bricka	Skriv M6X35 mm	Skriv M6X40 mm

Tillbehörslista och leverans

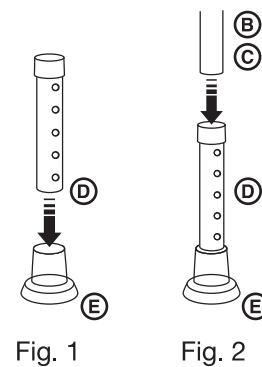

Sätt på de fyra gummipropparna (E)
nertill på benen (D)
Se fig. 1 Sätt nu på benen med gummi-
propparna på rören. Se fig. 2

Skruva fast rören (B) + (C) på
undersidan av sittplattan (A)
Förse vart och ett av de fyra hålen
utvändigt med en bricka (F) och
en skruv (G), och skruva till en
aning. Gör samma med den längre
skruven (H) vid hålet i mitten, se
fig. 2. Skruva sedan till skruvarna
hårt.

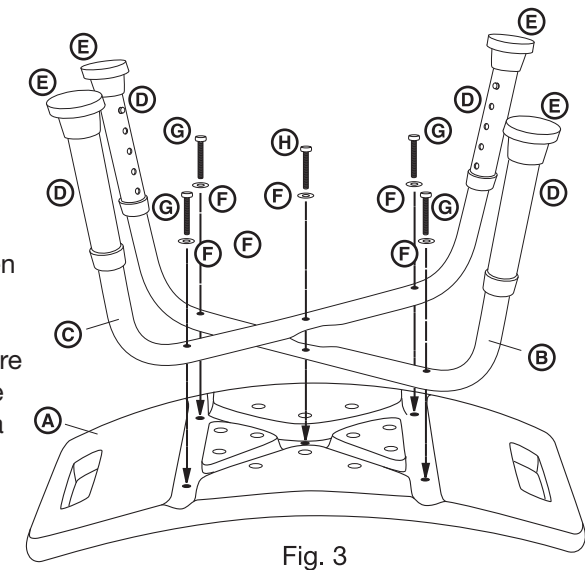

Inledning

Bästa kund,
Läs noga bruksanvisningen före montering och användning av artikeln! Bruksanvisningen behålls för att läsas om igen. Om produkten överläts åt annan ska även bruksanvisningen följa med.

ANSVARSFULL ANVÄNDNING

Duschstolen är endast avsedd som stöd i duschen för fysiskt handikappade personer. Den har utvecklats för privat bruk. Duschstolen är inte lämpad för yrkesmässigt bruk.

⚠ SÄKERHETSANVISNING

- Förpackningsmaterialet förvaras oåtkomligt för barn (kvävningrisk).
- Duschstolen ska förvaras oåtkomligt för barn. De kan försöka ställa sig eller klättra upp på den och på så sätt befaras välta med duschstolen.
- Se till att en annan person finns i närheten. Om hjälp behövs med att sätta sig eller resa sig upp, då kan denne vara till hjälp.
- Duschstolen får endast belastas med max. 100 kg.
- Kontrollera före användning, att duschstolen står stadigt och se till, att den står på ett halksäkert underlag utanför och i duschen. Annars kan man halka och skada sig.
- Duschstolen kan användas när omgivande temperatur är normal. Varmvatten, solstrålar, bastuvärme, extrem kyla o s v, kan inverka på stolens yta vilket i sin tur gör temperaturen skadlig för hälsan.
- Duschstolen ska endast användas till det syfte den är avsedd.
- Duschstolen ska regelbundet kontrolleras att den är stabil, samt att skruvar och hopfogningar sitter korrekt, vid behov ska de spännas till.
- Gör inga ändringar på duschstolen och reparera den inte själv ! Använd endast originalreservdelar. Utförs osakkunniga reparationer kan skador uppstå !

Introduktion

Kære kunde,
Læs denne vejledning grundigt før varen monteres og tages i brug! Opbevar den under alle omstændigheder for senere læsning! Hvis De videregiver varen, skal også denne vejledning videregives.









Hensigtsmæssig brug

Brusetabureten skal udelukkende bruges som siddemulighed for støtte af fysisk handikappede mennesker under brusning. Den er blevet udviklet til privat brug. Brusetabureten er ikke egnet til erhvervsmæssig brug.

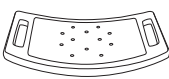Sikkerhedsanvisning

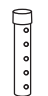- Hold emballagematerialet væk fra børn (fare for kvælning).
- Hold børn væk fra brusetabureten. De kunne forsøge at stille eller at trække sig op på den, og derved vælte sammen med brusetabureten.
- Vær opmærksom på, at en anden person befinder sig i nærheden. Såfremt de har brug for hjælp, når De sætter eller rejser Dem, kan denne person være Dem behjælpelig.
- Brusetabureten må belastes med max. 100 kg.
- Kontrollér før brug, om brusetabureten står fast, og vær opmærksom på, at der forefindes et skridsikert underlag udenfor og i brusenichen. De kunne ellers glide og komme til skade.
- Brug kun brusetabureten, såfremt temperaturen på dens overflade er uskadelig. Gennem varmt vand, solstråler, saunabetingelser, ekstrem kulde osv. kan overfladen på tabureten få en sundhedsskadelig temperatur!
- Brug kun brusetabureten iht. dens tilsigtede formål.
- Brusetabureten skal regelmæssigt kontrolleres for stabilitet samt korrekt placering af skruer og samlinger, som skal efterspændes, såfremt det er nødvendigt.
- Foretag ingen ændringer på brusetabureten og reparér den ikke selv! Der må kun bruges originale reservedele. Der kan opstå uforudsigelige skader pga. usagkyndige reparationer!

Deleliste og leveranceomfang

1 x A	1 x B	1 x C	4 x D
			
Sikkeflade	Sæderør	Sæderør	Ben
4 x E	5 x F	4 x G	1 x H
			
Gummidup	Spændeskive	Skrue M6X35 mm	Skrue M6X40 mm

Montage

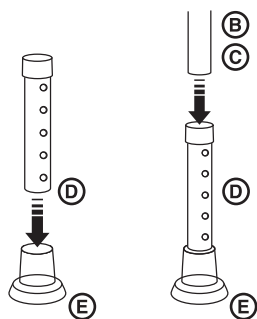


Fig. 1

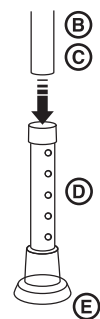


Fig. 2

Sæt de fire gummidupper (E) på enderne af benene (D), se fig. 1. Sæt nu benene med gummidupperne på sæderørene, se fig. 2.

Fastgør sæderørene (B) + (C) på undersiden af siddefladen (A) ved at forsyne hver af de fire huller udvendigt med en spændeskive (F) og en skrue (G), og dreje skrueene lidt. Gør det samme med den længere skrue (H) ved det midterste hul, se fig. 2. Spænd herefter skrueene fast.


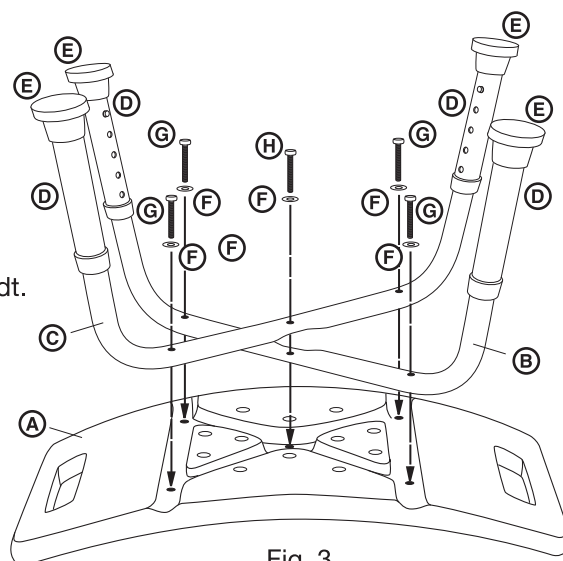


Fig. 3

Indstilling af sædehøjde

⚠ ADVARSEL!

- Brug ikke produktet, hvis der er synlige skader!
- Vær opmærksom på ikke at blive klemt i hullerne.
- Brug ikke brusetaforen, hvis trykknapperne for justering ikke er gået i hak i hullerne!
- Indstil alle ben på samme højde for at undgå, at taburetten vælter.

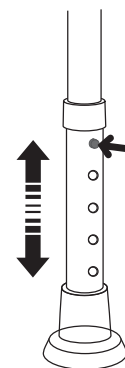

Tryk på trykknapperne på benene og træk benene ud til den ønskede højde. De skal gå synligt i hak i hullerne, se fig. 4. Indstil alle ben på samme højde. Drej gummidupperne sådan, at de slutter tæt og fast til gulvet, så brusetaforen står sikkert.

Fig. 4

Brug

Gå ind i brusenichen og sæt Dem på brusetaforen. De kan nu vaske Dem, som De plejer.

Rengøring og vedligeholdelse

⚠ FORSIGTIG!

- Brug ikke ætsende eller skurende rengøringsmidler eller svampe. Disse kan angribe overfladen.
1. Aftør brusetaforen efter behov med en våd klud og muligvis lidt mildt rengøringsmiddel.
 2. Tør bagefter brusetaforen grundigt, før De bruger den igen.

Bortskaffelse

Aflever varen samt emballagen til et autoriseret affaldsanlæg eller via den kommunale affaldsordning. Vær opmærksom på de aktuelt gældende regler. Informér Dem om miljørigtig bortskaffelse i Deres kommunalforvaltning.

Dette produkt er i overensstemmelse med EU-direktivet 93/42/EØF for medicinske produkter.