

Kilberry CARE[®]



Made in China
HN4959

Manufactured for:

Harald Nyborg
Gl. Højmevej 30
DK - 5250 Odense SV
Tel: +45 63 95 95 00

DK

Rollator/Transportstol
Bruksanvisning

SE

Rullator/Transportstol
Bruksanvisning

Samling



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

1. Sæt rollatoren, så alle hjul støtter på jorden. Vend forhjulene væk fra dig, og pres støttestangen ned, indtil den går i indgreb i begge sider (fig. 1). Vip sædet ned.
2. Sæt håndtagne i rollatorrammen. Når de befinder sig i den ønskede højde, skal boltene sættes igennem ramme og håndtag. Spænd delene ordentligt sammen med spændeskive og drejeregreb (fig. 2). Drejeregrebet bør spændes på ydersiden af rammen.
3. Sæt ryglænet i rammen, og sørg for at låseknapperne går i indgreb (fig. 3).
4. Vip sædet op. Anbring kurven under sædet, og sørg for, at den hviler på tværstængerne.

Dele

- 2 – Justerbare greb (2)
- 2 – Spændeskiver (2)
- 2 – Drejeregreb (2)

Teknisk information:

Hjulstorlek: 18,4 cm
 Bredd: 57 cm
 Sitshøjde: 54,5 cm
 Sitsstorlek: 35,5x32 cm
 Handtagens højde: 83-94 cm
 Bredd mellem handtagen: 45,5 cm
 Vikt: 9,5 kg

Varning!

Denna produkt är inte avsedd att användas som rullstol. För maximal säkerhet är det viktigt att du informeras om alla säkerhetsfunktioner av en kvalificerad terapeut, läkare eller auktoriserad återförsäljare. Låt din återförsäljare kontrollera och dra åt alla skruvar och rörliga delar med jämna mellanrum. Kontrollera alla plastdelar ofta med avseende på slitage. Produkten är inte avsedd att hjälpa användaren från sittande till stående ställning. Luta dig inte för mycket mot produkten vid stopp. Bromsarna är inte konstruerade för att motstå alltför stort tryck. Överbelastning innebär att bromskablarna sträcks eller slits så att de behöver bytas eller justeras. DMI-rullatorer rekommenderas inte för personer med mycket nedsatt rörlighet som behöver ett gåstativ. Vi rekommenderar att du kontaktar din läkare innan du använder denna produkt, särskilt om du tar mediciner. Om denna varning ignoreras kan det leda till personskador.

Var försiktig!

Kontrollera alltid bromsarna innan du använder rullatorn/transportstolen. Se till att bromsarna alltid är i felfritt skick. Kontrollera regelbundet att inga delar sitter löst, att alla vajrar är åtdragna och att rullatorn/transportstolen är ren. Rullatorn/transportstolen har det bäst när den är helt monterad.

Användning

Så går du med rullatorn

Ta tag i handtagen och gå långsamt bakom rullatorn. Skjut den lugnt framför dig med vikten jämnt fördelad på båda handtagen. När du vill stanna trycker du upp bromsarna precis som på en cykel.

Så sitter du på rullatorn

Se till att rullatorn står på ett plant underlag. Lås rullatorns handbromsar genom att trycka in dem. Handtagen låses fast i nedersta position. Se till att bromsarna är låsta. Vänd dig om och gå långsamt baklänges tills dina ben berör rullatorns sits. Sätt dig ner och se till att fördela vikten jämnt.

Så använder du transportstolen

Aktivera handbromsarna och låt din ledsagare hålla fast i handtagen när du reser dig och sätter dig ner. När du sitter på sitsen ska du hålla ner fotstöden och placera båda fötter på dem. Fötterna ska alltid vila på fotstöden när stolen är i rörelse. Lossa handbromsarna och låt ledsagaren skjuta stolen långsamt framåt. Se alltid till att ledsagaren låser bromsarna när stolen inte är i rörelse.

Så använder du bromssystemet

Bromsarna aktiveras genom ett tryck på bromshandtaget. Handtaget går i lås när det är i nedersta position. Frigör bromsarna genom att trycka upp bromshandtagen.

Så faller du ihop rullatorn

Ta av korgen innan du faller ihop rullatorn. Fäll upp sitsen i lodrät position. Dra upp stödstången för att fälla ihop rullatorn.

Så faller du upp rullatorn

Alla hjul ska beröra marken. Tryck ner handtagen och vänd framhjulen bort från dig. Tryck ner stödstången tills den går i lås på båda sidor. Fäll ner sitsen.

Brug

Sådan går du med rollatoren

Tag godt fat i håndtagene, og gå langsomt bag rollatoren. Skub den roligt fremad med vægten jævnt fordelt mellem håndtagene. Når du vil stoppe, skal du presse bremsegrebene op ligesom på en cykel.

Sådan sidder du på rollatoren

Sørg for, at rollatoren står på et plant underlag. Lås rollatorens håndbremser ved at trykke bremsegrebene ned. Grebene fastlåses i nederste position. Sørg for at bremserne er låst. Vend dig om, og gå langsomt baglæns, indtil dine ben berører rollatorens sæde. Sæt dig ned, og sørg for altid at fordele vægten jævnt.

Sådan går du med transportstolen

Aktivér håndbremserne, og få din ledsager til at holde fast i håndtagene, når du rejser dig og sætter dig ned. Når du sidder på sædet, skal du folde fodstøtterne ned og placere begge fødder på disse. Fødderne skal altid være på disse, når stolen er i bevægelse. Løsn håndbremserne og få ledsageren til at skubbe stolen langsomt fremad. Sørg altid for, at ledsageren låser bremserne, når stolen ikke er i bevægelse.

Sådan bruger du bremsesystemet

Bremserne aktiveres ved at trykke ned på bremsehåndtaget. Grebet går i indgreb, når det er i nederst position. Bremserne frigøres ved at presse bremsehåndtagene op.

Sådan klappes rollatoren sammen

Tag indkøbskurven af, før du klapper rollatoren sammen. Vip sædet op i lodret position. Træk støttestangen op for at klappe rollatoren sammen.

Sådan klappes rollatoren ud

Alle hjul skal berøre jorden. Pres håndtagene ned, og vend forhjulene væk fra dig. Pres støttestangen ned, indtil den går i indgreb i begge sider. Vip sædet ned.

Tekniske data:

Hjulstørrelse: 18,4 cm
 Bredde: 57cm
 Sædehøjde: 54,5 cm
 Sædestørrelse: 35,5x32cm
 Håndtagenes højde: 83-94 cm
 Bredde mellem håndtagene: 45,5 cm
 Vægt: 9,5 kg

Advarsel!

Dette apparat er ikke beregnet til brug som kørestol. Af hensyn til en maksimal sikkerhed er det vigtigt at du bliver informeret om alle sikkerhedsfunktioner af en kvalificeret behandler, læge eller en autoriseret sælger. Få din forhandler til at kontrollere og efterspænde alle bolte og bevægelige dele med regelmæssige mellemrum. Kontrollér alle plastdele ofte for slitage. Apparatet er ikke beregnet til at hjælpe brugere op fra siddende til stående stilling. I forbindelse med stop skal du ikke læne dig for hårdt mod apparatet. Bremsene er ikke designet til at modstå for stort pres. Overbelastning medfører, at bremsekablerne strækkes eller flosser, så det er nødvendigt at justere eller udskifte dem. DMI-rollatorer anbefales ikke til personer med væsentlig nedsat bevægelighed, som har brug for et gangstativ. Vi anbefaler, at du kontakter din læge, før du tager dette produkt i brug, især hvis du tager en eller anden form for medicin. Hvis denne advarsel ignoreres, kan det medføre personskader.

Forsigtig!

Kontrollér altid bremsene, før du bruger rollatoren/transportstolen. Sørg for, at bremsegrebene altid er i fejlfri stand. Kontrollér løbende, at der ikke er nogen løse dele, at alle wirer er stramme, og at rollatoren/transportstolen er rengjort. Rollatoren/transportstolen har bedst af altid at være samlet helt.

Montering



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

- 1.Sätt rollatorn så att alla hjul står på marken. Vänd framhjulen bort från dig och tryck ner stödstången tills den klickar fast i båda sidor (fig. 1). Fäll ner sitsen.
- 2.Sätt handtagen i rollatorns ram. När de befinner sig i önskad höjd ska skruvarna sättas genom ram och handtag. Dra åt delarna ordentligt med bricka och reglage (fig. 2). Reglaget ska dras åt på yttersidan av ramen.
- 3.Sätt ryggstödet i ramen och se till att ramen går i lås (fig. 3).
- 4.Fäll upp sitsen. Sätt korgen under sitsen och se till att den vilar på tvärstängerna.

Delar

- 2 – Justerbara reglage (2)
- 2 – Brickor (2)
- 2 – Skruvar (2)