

Kilberry CARE[®]



DK

**Letvægtsrollator i
aluminium, model Napoli**
Brugsanvisning

SE

**Lättviktsrollator i
aluminium, modell Napoli**
Bruksanvisning

Specifikationer

Mål: 690×650×(845-960) mm

Sædebredde: 450 mm

Sædehøjde: 560 mm

Nettovægt/bruttovægt: 7,8/9,0 kg

Bæreevne: maks 130 kg

ADVARSEL!

Det er meget vigtigt, at du læser hele brugsanvisningen grundigt, før rollatoren samles og bruges.

Brug ikke rollatoren, hvis du vejer mere end den maksimalt tilladte brugervægt.

Rollatoren kræver kun lidt samling, som kan gøres uden brug af værktøj. Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du folder rollatoren ud eller sammen.

Brug ikke rollatoren til at transportere tunge personer eller tunge genstande.

Rollatoren er ikke legetøj.

Kontroller, at låsegrebet til højdeindstilling af håndtagene er spændt forsvarligt.

Pas på! Nogle dele på rollatoren kan føles kolde eller varme, hvis de udsættes for særligt lave eller særligt høje temperaturer.

Sikkerhedsforskrifter vedrørende brug

Hvis rollatoren står stille eller parkeres, skal parkeringsbremserne i begge sider altid aktiveres.

Kontroller, at parkeringsbremserne i begge sider er aktiveret, inden du sætter dig på rollatorens sæde.

Læn dig ikke til siden eller bagover, når du sidder på rollatoren.

Hold rollatoren så tæt ved dig som muligt for at opnå den bedst mulige støtte og sikkerhed.


Pas på, at løstsiddende tøj ikke kommer i klemme mellem bremserne og hjulene, da det kan få dig til at falde. Vi anbefaler, at du ikke bruger løstsiddende tøj.

Indholdsfortegnelse

Oversigt	4
Samling	5
Brug	6
Opbevaring og transport	8

Øversigt

1. Håndtag
2. Ryglæn
3. Bremsegreb
4. Bremsekabel
5. Styr
6. Sæde med strop til sammenfoldning
7. Taske med lynlås
8. Sædeskinne
9. Vippepedal

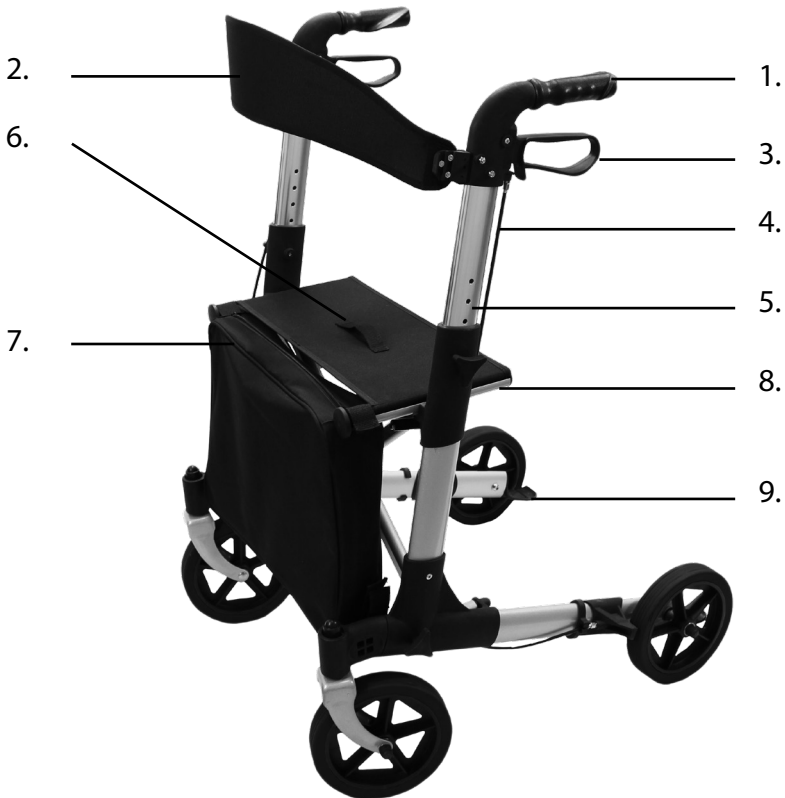


Samling

Tag alle delene ud af emballagen, og kontroller, at du har 1 stel, 2 baghjul med bremses, 2 forhjul og 2 vingeskruer.



1. Skub rørene fra baghjulene ind i hullerne bagest på stellet.

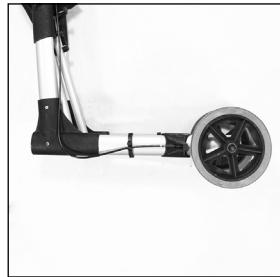

2. Sæt forhjulene ind i hullerne forrest på stellet.



3. Fastgør baghjulene og forhjulene ved at sætte vingeskruerne ind i hullerne på rollatorens sider og spænde dem fast.



Brug

GÅ

Rollatoren er beregnet som støtte og til at give en naturlig balance.

Gå langsomt bag rollatoren, mens du holder godt fast i håndtagene. Sørg for at fordele vægten ensartet på de to håndtag.



Træk for at bremse



Slip for at rulle



Skub ned for at parkere

BREMSE

Den normale bremse kan aktiveres ved at trække i bremsegrebet som på en cykel. Mens du går med rollatoren, kan du trække i bremsegrebet for at bremse, standse eller komme omkring forhindringer. Parkeringsbremsen kan aktiveres ved at trykke bremsegrebene nedad til låst position. Denne funktion er velegnet, hvis brugeren vil blive på samme sted i længere tid. Træk roligt op i bremsegrebene for at udløse parkeringsbremsen.

FORSIGTIG

Afprøv altid bremsene før hver brug af rollatoren. Hold altid bremseklodderne og hjulene rene af hensyn til sikkerheden ved brug. Hvis hjulene er snavsede, fungerer bremsene muligvis ikke korrekt.

Undlad at skille rollatoren ad, og undlad at tage bremsekablerne af stellet.

Forsøg ikke at skubbe rollatoren fremad, når parkeringsbremsen eller bremsen er aktiveret.

Brug ikke bremsene hele tiden, mens rollatoren kører.

Brug

INDSTILLING AF HÅNDTAGENE

Løsn låsegrebene til styrene. Indstil håndtagene i den ønskede højde. Spænd låsegrebet igen.



Lav position



Høj position

KANTBESKYTTER OG VIPPEFUNKTION

Bremseklodserne foran baghjulene er designet, så de forhindrer baghjulene i at sætte sig fast på hjørner, i dørkarme og lignende.

Træd på vippepedalen ved siden af baghjulet for at vippe rollatorens forhjul op i luften. Det gør det nemmere at passere dørtrin og lignende.



Vippepedal

Opbevaring og transport

Træk i udløseren, og træk stroppen på sædet opad på samme tid, og skub siderne sammen for at folde rollatoren sammen. Når rollatoren er foldet sammen, er den nem at opbevare og transportere.



Træk i udløseren



Træk i stroppen

Vedligehold

Efterspænd regelmæssigt alle skruer, bolte og møtrikker på rollatoren.

Indkøbstaske

Der medfølger en indkøbstaske. Den kan bære op til 15 kg og kan nemt monteres og afmonteres ved hjælp af fire velcroremme.



Indkøbstaske

Specifikationer

Storlek 690*650*(845-960) mm

Sätetsbredd: 450 mm

Säteshöjd: 560 mm

N.V/B.V: 7,8/9,0 kg

Max. användarvikt: 130 kg

VARNING!

Det är mycket viktigt att du läser bruksanvisningen noggrant före montering och användning av rollatorn.

Använd inte rollatorn om du väger mer än den maximala belastningsvikten. Endast några få steg behövs för att montera rollatorn och inga verktyg behövs.

Var försiktig när du fäller ut och ihop rollatorn så att du inte skadar fingrarna.

Använd den inte för att transportera tunga laster eller personer.

Rollatorn är inte en leksak.

Se till att låshjulet för höjdjustering för handtagen är ordentligt låst.

OBS! Vissa delar av rollatorn kan kännas varma eller kalla när de utsätts för extrema temperaturer.

Viktigt att veta om säkerhet vid användning

När rollatorn står stilla eller är parkerad, använd alltid parkeringsbromsarna på båda sidorna.

Innan du sätter dig på sätet, kontrollera att parkeringsbromsarna på båda sidorna är i låst läge.

Luta dig inte mot rollatorn och luta den inte i sidled eller bakåt i sittläge.

Se till att rollatorn hålls så nära kroppen som möjligt för att få rätt stöd och säkerhet.


Var försiktig med utsvängda kjolar och byxor, eftersom de kan fastna mellan bromsklotsen och hjulet och leda till att du och rollatorn ramlar. Vi rekommenderar därför att du inte har på dig utsvängda/vida kläder.

Innehållsförteckning

Översikt	11
Monteringsinstruktioner	12
Använda rollatorn	13
Förvaring och transport	15

Översikt

1. Handtag
2. Ryggstöd
3. Bromshandtag
4. Bromsvajer
5. Handtagsrör
6. Säte med rem för hopfällning
7. Väska med dragkedja
8. Sätesskenor
9. Tippedal

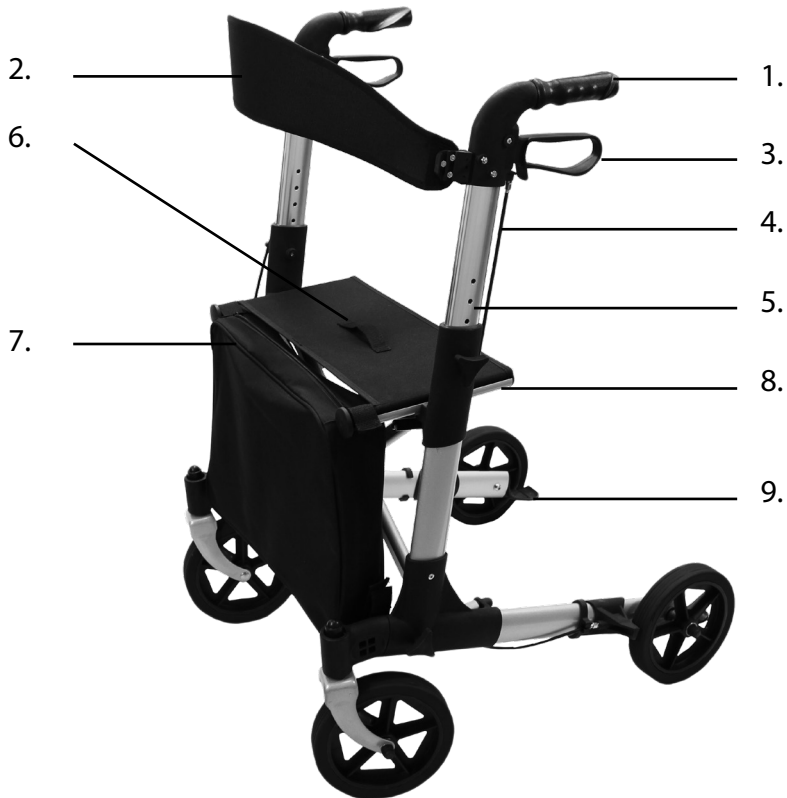

Monteringsinstruktioner

Ta ut alla delar ur förpackningen och kontrollera att du har ramen, två (2) bakhjul med låsbara bromsar, två (2) framhjul, två (2) vingskruvar.



1. Lås bakhjulen inuti ramen genom att föra dem in i de två undre hålen.



2. Sätt i framhjulen i ramens undre hål.



3. Lås bakhjulen och framhjulen genom att fixera vingskruvarna i sidohålen.



Använda rollatorn

PROMENERA


Denna produkt är avsedd som ett stöd för att ge naturlig balans. Gå långsamt bakom rollatorn med ett fast grepp om handtagen. Se till att alltid balansera vikten väl mellan de två handtagen.



Kläm för att stoppa



Släpp för att rulla

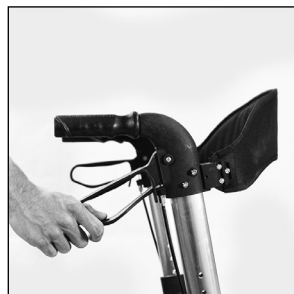

Tryck ner för att låsa

BROMSNING

Du kan aktivera den normala bromsen genom att dra upp handbromsspaken som på en cykel. Denna funktion kan aktiveras medan du promenerar med rollatorn för att sakta in, rulla, stoppa eller manövrera runt hinder som kan dyka upp på vägen. Parkeringsbromsen kan aktiveras när handtaget trycks ner i låst läge. Denna funktion aktiveras när användaren är stillastående en längre tid. För att lossa parkeringsbromsen, dra den försiktigt uppåt.

VIKTIGT!

Kontrollera alltid bromsarna innan du använder rollatorn. Håll alltid bromsklotsarna och hjulen rena för säker användning. Om hjulen är smutsiga är det inte säkert att bromsarna fungerar korrekt.

Håll alltid rollatorn helt monterad, utan att ta loss bromsvajern från huvudramen.

Rollatorn får inte köras eller tryckas med kraft när parkeringsbromsarna är ansatta eller när hjulen är delvis låsta med bromsarna.

Använd inte bromsarna kontinuerligt när rollatorn är i rörelse.

Använda rollatorn

JUSTERA HANDTAGEN

Skruva loss låshjulet för handtaget. Tryck handtagsrören uppåt/nedåt till önskad höjd. Dra åt låset igen.



Handtag i lågt läge



Handtag i högt läge

KANTSKYDD OCH TIPPFUNCTION

Bromsklotsarna framför bakhjulen förhindrar att bakhjulen fastnar i hörn, dörrkarmar etc.

Använd tippfunktionen genom att trampa med fotens framdel ner på tippedalen bredvid bakhjulet. Det är då lättare att tippa rollatorn över trösklar, kanter etc.



Tippedal

Förvaring och transport

Fäll ihop rollatorn genom att dra i låsanordningen och sätesremmen på samma gång och föra ramen åt sidan. När rollatorn är hopfäld är den enkel att förvara och transportera.



Dra i låsanordningen



Dra i remmen

Underhåll

Dra regelbundet åt alla skruvar, bultar och muttrar på rollatorn.

Shoppingväska

Shoppingväskan medföljer. Den kan bära upp till 15 kg och sätts fast och tas bort enkelt med fyra kardborreremmar.



Shoppingväska

Made in China

Fremstillet for/Tillverkad för:

Harald Nyborg Gl. Højmevej 30

DK - 5250 Odense SV

Tel: +45 63 95 95 00

Made in China

Vare nummer/Art nr: 9310